

見やすい使いやすい  
医療用 自動血圧計

Technology You Can Trust **AND**  
A&D Medical

# Vital Note

医療機器承認番号 21700BZZ00294000

外来・検診に



TM-2580

病棟に



TM-2581



# ダブル表示だから、見やすい！ 使いやすい！

測定値は、大きく見やすい視認性に優れた蛍光表示(LED)

各種の機能設定は、一目で確認できて使いやすい液晶画面表示(LCD)

## 視認性を高めたW表示・血圧計

- ★ 見やすく、判りやすいダブル表示
- ★ 新・血圧モジュールの採用で信頼性アップ
- ★ 広範な通信メディア、システムに対応できる拡張性
- ★ 充実した便利な付加機能  
マニュアル・平均測定モード、体動サイン、脈同期音、脈波レベル表示
- ★ 約1.5kgの軽量ボディ、スマートなコンパクトスタイル



## 外来・検診

TM-2580  
¥180,000(税抜)



## AVG測定

- 複数回測定、平均の値を表示

## 病棟

TM-2581  
¥240,000(税抜)



## 監視・アラーム

- 最高血圧、脈拍数の各アラーム上・下限が設定でき監視
- アラームの発生時には、アラームランプが点滅または点灯、該当の測定値表示の点滅、アラーム音の鳴動
- アラームの優先度によりアラームランプは、中レベルであれば点滅、低レベルは点灯



## 血圧

- 加圧値設定は、患者に最適な圧力まで自動加圧または、140~220mmHgまで20mmHg刻みの随時設定
- マニュアル測定モードは、聴診器を用いた聴診法により血圧を測定
- 平均測定モードは、自動的に血圧を複数回測定し、その平均値を表示
- 血圧測定中の脈検知に同期してブザー音が鳴動

## 表示

- 最高血圧値、最低血圧値、脈拍数は、見やすく大きなLED表示、各種の機能設定は、確認しやすいよう液晶画面にまとめて表示
- 測定値を気にする方への配慮から、測定値を表示しないブランク表示
- 測定中に体動を検知した場合に「♡」を点灯
- 過去の測定値を最大10件分呼出表示できる前回値表示
- 測定中の脈検知毎に脈波の大きさに応じたレベルを表示

## 印字

本体に別売プリンタTM-PR258を接続すると、赤外線通信により、測定値やデータ、リストなどの出力データを印字できます。



- コンパクトに設置(血圧計本体のACアダプタ内蔵)
  - オートカッター付
  - 用紙の装着が簡単
  - オリジナルコメントの付加が可能
- プリンタ TM-PR258  
¥120,000(税抜)
- 仕様  
印字方式 感熱紙  
用紙幅 58mm  
外形寸法 177(W)×150(D)×123(H)mm  
質量 約1.8kg  
消費電力 25VA以下  
電源 AC100V(50/60Hz)



## ■ 印字例

測定値

2013年 6月 1日 20時54分	
最高血圧	119 mmHg
平均血圧	103 mmHg
最低血圧	85 mmHg
脈拍数	60 bpm

ABCクリニック  
休診日：毎週月曜日  
TEL 0123-45-xxxx  
ABC Clinic

リスト(最新10回分)

時刻	最高血圧	平均血圧	最低血圧	脈拍数 (bpm)
20:02	113	89	79	80
20:03	114	95	86	80
20:04	122	104	83	100
20:05	119	98	86	120
20:06	146	116	101	80
20:07	200	165	150	80
20:08	201	169	145	80
20:10	200	167	148	80
20:10	201	169	149	80
20:10	201	165	146	80


テーブル

時刻	最高血圧	平均血圧	最低血圧	脈拍数 (bpm)
20:30	123	107	83	120
20:31	154	125	107	159
20:32	200	172	148	100
20:34	208	219	193	200
20:36	200	173	146	100
20:37	148	124	103	160
20:39	120	98	83	119
20:39	102	86	68	80
20:40	82	67	55	60
20:41	81	72	54	60
20:42	82	70	58	60
20:39	120	98	83	119

# 拡張オプションの豊富なバリエーション 様々な場所、方法でデータを送信できます。

## 外来

TM-2581  
+  
TM2570-02

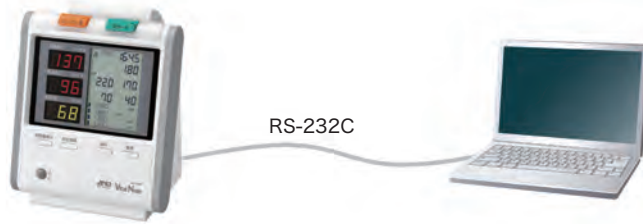

RS-232C

## 無線

無線双方向通信で  
最大3ベッドまで監視

TM-2581  
+  
TM2570-20



バイタルステーションS  
TM-2125

## 治験

ワンセット 20台まで拡張可能



TM-2581 + TM2570-02 + AD-8526

LAN

## 検診



TM-2581 + TM2570-02

健診アダプタ  
AD-6903A  
測定機器、ID入力機器を  
最高4台まで接続

バーコード  
スキャナ

バーコード  
スキャナ

全自動身長体重計 AD-6228A

LAN

## 拡張 RS-232C テレメータ

- 無線ユニットTM2570-20(オプション)の取付により測定データを、セントラルモニター(バイタルステーションTM-2125)へ無線送信、監視、遠隔操作が可能
- 外部入出力端子(RS-232C)は、RSユニットTM2570-02(オプション)で取付られ他のシステムとの接続が可能



## 拡張 イーサネット(LAN)ポート接続

イーサネット・コンバータ AD-8526  
¥45,000(税抜)

JANコード:4981046603010

- RS-232C出力をコンピュータのイーサネット(LAN)ポートに接続するためのコンバータ
- RSユニットTM2570-02が必要になります



無線通信機能付き(Bluetooth内蔵)

## バイタルノート

TM-2580

¥220,000(税抜)

Bluetooth内蔵

Continua  
CERTIFIED

コンティニューV1デザインガイドライン準拠

ご注文の際は、コンティニューモデルとご指定ください。



## 送信

送信内容

- ・最高血圧値
- ・最低血圧値
- ・平均血圧値
- ・脈拍数
- ・測定日時

アクセスポイントへ  
自動送信

## 受信

コンティニュー対応機種



血圧計にBluetoothモジュールを搭載。  
血圧を測定後、自動的にアクセスポイントへ測定日時や測定値のデータを送信します。  
Bluetooth通信は情報のセキュリティ、信頼性に優れており、種々の健康管理システムの測定器として最適です。

仕様

型名	TM-2580	TM-2581
血圧測定方式	オシロメトリック方式	
圧力検出方法	容積型圧センサ	
圧力測定範囲	0~300mmHg	
圧力精度	±3mmHg	
測定範囲	最高血圧: 40~270mmHg、最低血圧: 20~200mmHg、脈拍30~250拍/分	
血圧インターバル測定	—	測定間隔: OFF, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120分 *1分間隔測定は最長12分間継続し。その後5分間隔
表示方法	LED:7セグメント、液晶ディスプレイ	
メモリデータ数	10データ	
電源	AC100V (50-60Hz)	
消費電力	25VA	
外形寸法	177 (W) × 211 (H) × 136 (D) mm	
重量	約1.5kg	
監視機能	—	最高血圧、脈拍数の上・下限 アラーム時: 測定値の点滅、アラーム音の鳴動、 アラームランプの点滅、点灯
付属品	本体、MEラテックスフリーカフアダルト12cm、エアホース(2m、1.5m 各1本)、ACアダプタ、取扱説明書、添付文書、保証書	
販売名	患者監視装置 TM-258	
一般的名称	多項目モニタ	
JMDNコード	33586002	
承認番号	21700BZZ00294000	
クラス分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器	
JANコード	4981046700054	4981046700047
商品コード	TM2580	TM2581
標準価格(税抜)	¥180,000	¥240,000

オプション



**MEラテックスフリーカフ**  
アダルト 12cm  
TM-CF301A  
¥8,000(税抜)  
JANコード: 4981046712668  
適応腕周範囲: 20~33cm



**ディスポカフ アダルト**  
TM9159A-4  
¥12,000(税抜)  
JANコード: 4981046710022  
適応腕周範囲: 23~33cm  
入数 10枚



**エアホース (コネクタ付)**  
1.5m  
TM9131BL-150  
¥4,000(税抜)  
JANコード: 4981046710268



20cm  
TM9131BL-020  
¥2,000(税抜)  
JANコード: 4981046710107



**ラージ 14cm**  
TM-CF401A  
¥9,900(税抜)  
JANコード: 4981046712675  
適応腕周範囲: 30~41cm



**スモール 9cm**  
TM-CF201A  
¥9,900(税抜)  
JANコード: 4981046712651  
適応腕周範囲: 14~22cm



**チャイルド 7cm**  
TM-CF101A  
¥9,900(税抜)  
JANコード: 4981046713733  
適応腕周範囲: 9~18cm



2m  
TM9131BL-200  
¥4,000(税抜)  
JANコード: 4981046710251



**架台**  
TM-ST100A  
¥60,000(税抜)  
JANコード: 4981046712699



**ベッド取付架台**  
TM2540-04A  
¥35,000(税抜)  
JANコード: 4981046711616



**キャリングケースCC-100**  
TM-OP100  
¥65,000(税抜)  
JANコード: 4981046712156



**無線ユニット**  
TM2570-20  
¥180,000(税抜)  
JANコード: 4981046711784



**RSユニット**  
TM2570-02  
¥60,000(税抜)  
JANコード: 4981046700115

定期点検サービス

あんど **and 安心サポートone** いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。  
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・ディME機器相談センター

**0120-707-188**

受付時間: 月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

測定器の総合商社  
**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.ureruzo.com http://satosokuteiki.com