

Smart Skin Care®

SEBUTAPE 設定機能の追加

クライアントアプリVer4.65におきまして、SEBUTAPE設定機能を追加しました。本設定は測定に使用するSEBUTAPEについて、現行製品（S2C-SEBUTAPE-1）とリニューアル製品（S2C-SEBUTAPE/A）を切り替えるための機能となります。



HOME画面の  アイコンを選択し、設定画面に遷移します。

「設定」の項目に「セブテープの設定」が追加されています。



測定で使用するSEBUTAPE を選択して設定を保存します。設定は端末ごとに保存され、測定時には選択したSEBUTAPE による皮脂量の評価を行います

◆リニューアル製品 (S2C-SEBUTAPE/A) 設定時



「撮影見本」に**リニューアル製品 (S2C-SEBUTAPE/A)** のイメージが表示されます

◆現行製品 (S2C-SEBUTAPE-1) 設定時



「撮影見本」に**現行製品 (S2C-SEBUTAPE-1)** のイメージが表示されます