

ポケット尿比重屈折計 Cat.No.4409

# PAL-09S



ポケット尿比重屈折計PAL-09Sは、尿比重をカンタン操作でデジタル表示します。  
コンパクトなサイズで重さもわずか100g。現場で素早く測定することができます。

## ●特長●

- 水で基準合わせが可能
- 測定時間はわずか3秒
- 片手で操作できる先進デザイン
- わずか100gの軽量タイプ
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 水で丸洗いできる防水仕様(IP65)
- 保管用ケース付き
- 電池残量表示機能付

## ●活用先の例●

- \* 病院の臨床検査室で
- \* 臨床検査センターで
- \* 病院の入院病棟(泌尿器科)で
- \* 救急・時間外診療時の検査において
- \* 尿の濃さの管理・チェック時に
- \* 医院・診療所で
- \* 集団検診センターで

## ●主な仕様●

測定項目：尿比重、温度  
 測定範囲：尿比重 1.000~1.100 (自動温度補正)、温度10.0~35.0℃  
 分解能：尿比重 0.001、温度0.1℃  
 測定精度：尿比重 ±0.002、温度1℃  
 温度補正：10~35℃  
 電源：単4アルカリ電池×2  
 電池寿命：約11,000回測定  
 防水保護等級：JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65  
 寸法・重量：5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)



GOOD DESIGN



実物大



¥32,300 (消費税別)

## ●測定方法●



①プリズム面にサンプルを滴下します。



②STARTキーを押します。



③約3秒後に尿比重を表示します。

## ●尿比重目盛について●

1979年に日本臨床病理学会標準化委員会(J.S.C.P.)で作成された目盛を採用しています。  
※尿以外の液体の比重値とは一致しませんので、ご注意ください。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

株式会社 アタゴ

<http://www.atago.net/> [eigy@atago.net](mailto:eigy@atago.net)

- ATAGO U.S.A., Inc.
- ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.
- ATAGO THAILAND Co., Ltd.
- ATAGO BRASIL Ltda.
- ATAGO ITALIA s.r.l.
- ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.
- ATAGO RUSSIA Ltd.

HACCP GMP GLP

アタゴ製品は HACCP, GMP, および GLPシステムに適合できます。



※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

測定器の総合商社  
株式会社 佐藤商事  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>