

ポケット犬猫尿比重屈折計

PAL-犬猫尿比重


Cat. No. 4529



犬猫の尿比重をカンタン・安全に測定できます。
表示はデジタルで見やすく、重さはわずか100gです。
操作は片手でOKなのでどこでも気軽にお使いいただけます。

特長

- 水で基準合わせが可能
- 水で丸洗いできる防水仕様 (IP65)
- 測定時間はわずか3秒
- 保管用ケース付き
- 携帯に便利なストラップを取付可能
- 電池残量表示機能付

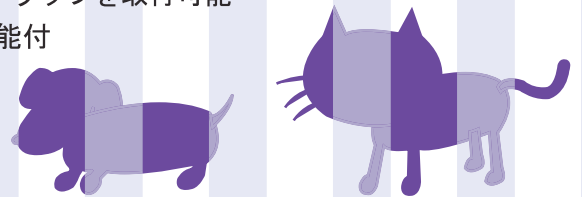

主な仕様

測定範囲	尿比重(犬) 1.000~1.060 (自動温度補正) 尿比重(猫) 1.000~1.080 (自動温度補正) 温度 10.0~35.0°C
分解能	尿比重 0.001・温度 0.1°C
測定精度	尿比重 ±0.001・温度 ±1°C
温度補正	10~35°C
環境温度	10~35°C
サンプル量	0.3ml
電 源	単4アルカリ電池×2本
電池寿命	約11,000回測定 (アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級	JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65
寸法・重量	5.5×3.1×10.9cm 100g(本体のみ)

※実物大



¥33,500 (税別)

測定方法



① プリズム面にサンプルを滴下します。



② STARTキーを押します。



③ 約3秒後に尿比重を表示します。

目盛について

主に米国で用いられている犬用、猫用の尿比重目盛を採用しています。犬尿を測定する場合は-d-の目盛、猫尿の場合は-C-の目盛に切り替えてください。STARTキーの長押しで切り替えができます。
※尿以外の液体の比重値とは一致しませんのでご注意ください。

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。

株式会社 アタゴ

<http://www.atago.net/> eigy@atago.net

ATAGO U.S.A., Inc.

ATAGO INDIA Instruments Pvt. Ltd.

ATAGO THAILAND Co., Ltd.

ATAGO BRASIL Ltda.

ATAGO ITALIA s.r.l.

ATAGO CHINA Guangzhou Co., Ltd.

ATAGO RUSSIA Ltd.

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

HACCP GMP GLP

アタゴ製品は HACCP, GMP, および GLPシステムに適合できます。



測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>